






Sterl STAT™



Sprej za površine z novo formulo



-  - 7 dnevno delovanje
-  - nestrupeno za ljudi, živali in okolje
-  - nevnetljivo, brez vonja, nevtralen pH
-  - uniči 99% bakterij, virusov, kvasovk, plesni
-  - neposreden nanos na površine in medicinske aparate



Sterl STAT™

Kako Sterl STAT deluje?

Učinek je fizičen in kemičen.

Fizični učinek povzroča menjujoča se površinska napetost. Sterl STAT vsebuje polimer na osnovi polydimethylsiloxan-a, ki ima nizko površinsko napetost in je hidrofobičen, ter dodatne sestavine z relativno visoko površinsko napetostjo. Takšna sestava omogoča izmenično površinsko napetost, na hidrofobičnih in hidrofiličnih površinah in v njihovi neposredni bližini. Na takšnih površinah mikroorganizmi težko kolonizirajo in težko naredijo biofilm.

S pomočjo biofilma se mikroorganizmi prilepijo na podlago, da se lahko razmnožujejo. Če pa se ne morejo prilepiti na podlago, se tudi ne razmnožujejo in postanejo stari in šibki. Mikroorganizmi so občutljivi na blage biocide dodane polimeru, ki je glavna sestavina Sterl STAT razkužil.

Kemični učinek Sterl STAT-a omogoča polimeru, glavni sestavini, da ostane pritrjen na površini preko hidrogenih vezi in tako zagotavlja **7-dnevno podaljšano zaščito**.

Področje uporabe Spreja za površine Sterl STAT

- bolnišnice
- klinični laboratoriji
- zdravstveni domovi
- domovi za starejše
- prehrabena industrija
- veterinarske ustanove
- priprava hrane
- raziskovalni laboratoriji
- karantene ipd.
- uporaba na medicinskih aparatih (v skladu z MEDICAL DEVICE DIRECTIVE 93/42 EEC)

Lastnosti in prednosti Spreja za površine Sterl STAT

- 7 dnevna zaščita
- ne vsebuje alkohola, kloridov in aldehydov
- nestrupeno
- neposreden nanos na površine in medicinske aparate
- nekorozivno
- pripravljen za uporabo
- neagresivno
- skrajša čas čiščenja
- brez vonja
- znižuje stroške čiščenja
- nevnetljivo
- deluje v manj kot 1 minuti
- uniči 99% vseh mikroorganizmov kot so bakterije, virusi, kvasovke, plesni vključno z MRSA, SARS, Norovirusi, TB, hepatitis, HIV-1, E-coli, legionela, listeria, C. Diff...

Certifikati in testiranja razkužil Sterl STAT

Baktericidna aktivnost EN1276
-MRSA
-Pseudomonas aeruginosa
-Echerichia coli (E.Coli)
-Echerichia coli O147:H7 (E. coli O157:H7)
-Staphylococcus aureus
-Enterococcus hirae
-Listeria monocytogenes
-Salmonella typhimurium
-Yersinia enterocolitica
-Mycobacterium smegmatis

Sporocidna aktivnost EN13704
-Clostridium difficile (C.diff)
-Bacillus subtilis
-Bacillus stearotherophilus
Fungicidna aktivnost En1650
-Candida albicans
-Aspergillus niger

Virucidna aktivnost CEN TC 216
-Feline Coronavirus (SARS Surrogate)
-Winter Vomiting in Diarrhoea bug (Norovirus)
Higijenski test rok En1500
-E.coli



Sestava Spreja za površine Sterl STAT

Quaternary ammonium compounds (amonijeve soli)
Bronopol: 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol (visoko aktivne antimikrobne sestavine)
Biguanide: 2-carbamimidoylguanidine^(IUPAC kemijsko ime)

Kako uporabljamo Sprej za površine Sterl STAT?

Na mehansko očiščeno površino ali medicinski aparat nanesimo Sterl STAT Sprej za površine in pustimo, da se posuši. Lahko tudi obrišemo s čisto papirnato brisačo. S pomočjo **byotrol**® aktivne formule bodo vaše površine in medicinski aparati razkuženi.

Varnostna opozorila in skladiščenje

Izogibajte se kontaku spreja z očmi. Ne redčite in ne mešajte z drugimi proizvodi. Skladiščenje: nobenih posebnih zahtev.

Pakiranje

Kataloška številka	Naziv artikla	Volumen	Število enot v kartonu
AST101	Sprej za površine	750 ml	6

Proizvajalec:

Audit Diagnostics
Ireland

Zastopnik za Slovenijo:

THORAX d.o.o.
LABORATORJSKA DIAGNOSTIKA
www.thorax.si
Malejeva ulica 21, 1000 Ljubljana
Tel.: 059 053 782 Fax: 059 053 462 Email: info@thorax.si

